


検査の前に、必ずお読みください

遺伝子検査 ご利用説明書

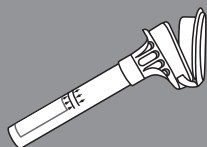

採取容器用

＼かんたん 3 STEP /



同意書に記入



検査試料を採取



ポスト投かん

DHC公式YouTubeチャンネルでは、
検査の方法についての動画もご紹介しています。

<https://s.dhc.co.jp/MDExNDMx>



DHC



遺伝子検査の進捗状況や検査結果をWEB上でご確認ください。
詳しくは「WEBレポート登録ガイド」をご覧ください。

検査の流れ

STEP
1

遺伝子検査申込同意書に記入

検査を受けるご本人の情報をご記入ください。

※記入漏れがあると検査ができません。ご注意ください。

※消せるボールペンは使用しないでください。

黒もしくは青の
ボールペンで
くっきりはっきり
丁寧に

STEP
2

検査試料を採取

⚠ 採取前の注意事項

- ・だ液を採取する1時間前から、水以外の飲食、喫煙、ガムをかむことは避けてください。
※カフェイン、ポリフェノール、食べかすなどはDNAの抽出や検査反応を阻害します。口腔内に残っていると、検査に影響が出る恐れがあります。
- ・歯磨きをする場合は、歯磨き粉が口腔内に残らないようしっかりゆすいでください。




採取の手順

- 検査試料の状態が悪い場合、検査結果に影響が出る恐れがあります。必ず手順に従って採取してください。
- 紛失や採取ミス、使用期限切れなどにより採取容器の再発送をご希望の場合は、「再発送手数料 税込¥3,300」が別途かかります。

- ① 漏斗に口を当て、少量のだ液を入れます。チューブの底を軽くたたいて流し込み、だ液が線と線の間まで入っていることを確認してください。



※レモンや梅干しなどすっぱいものを思い浮かべるとだ液が出やすくなります。

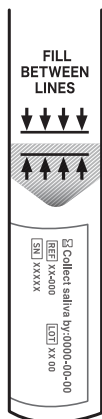


だ液の入れすぎに注意!

だ液の量は線と線の間まで。


※だ液を入れるのは、斜線の部分のみ

チューブの底に、だ液は溜まりません。この部分は、だ液が入らない仕組みになっています。ご注意ください。


- ② チューブをまっすぐに持ち、ふたをカチッと音がするまで押し下げ、しっかり閉じてください。

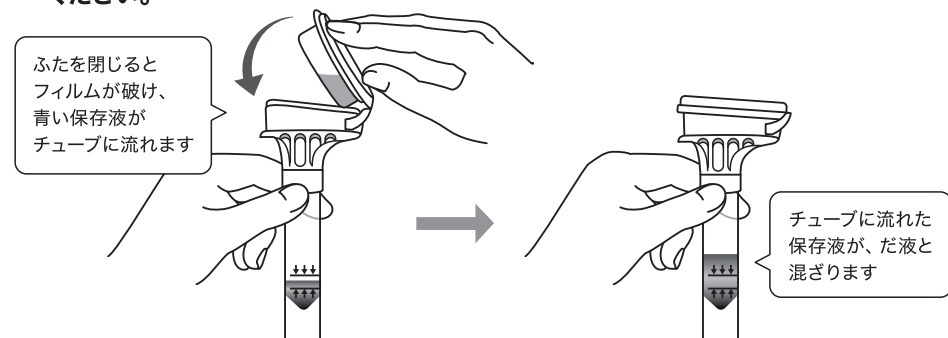

- ③ チューブをまっすぐに持ち、漏斗部分をねじって外して、付属のキャップを
しっかり締めてください。

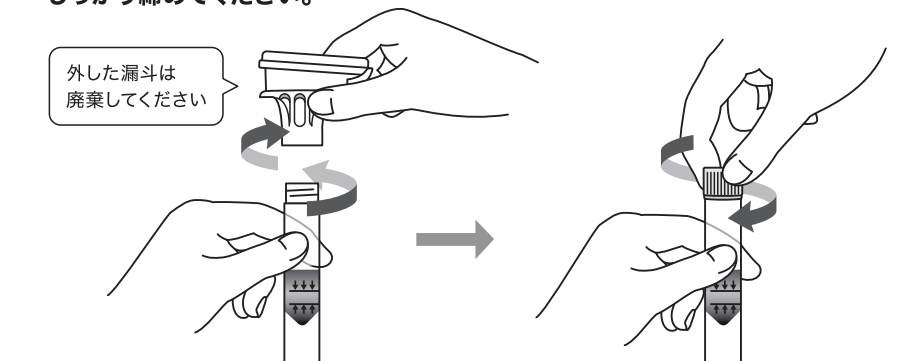

- ④ キャップを締めたら、チューブを5～6回程度
上下にひっくり返して振り、だ液と保存液を
よく混ぜてください。

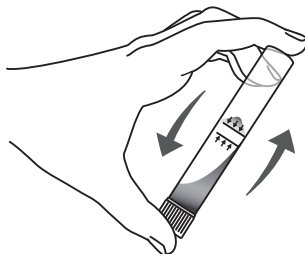

- ⑤ チューブにID番号シールを貼ってください。



※剥がれそうな時は、上からテープで固定してください。



※巻きつけないでください。

⑥ チューブをチャック袋に入れて、封をしっかりと閉じてください。



採取後の注意事項

- ・キャップはしっかりと締めてください。
※こぼれるなどして十分な検査試料が得られないと、検査ができない可能性があります。
- ・採取後は、すぐにご返送ください。



しっかり
封を！

チャック袋へは
採取した試料のみ
入れてください


STEP

3

ポスト投かん

同意書と検査試料を返信用封筒に入れて返送してください。

※ポスト投かんのほか、最寄りの郵便局窓口でも承っております。

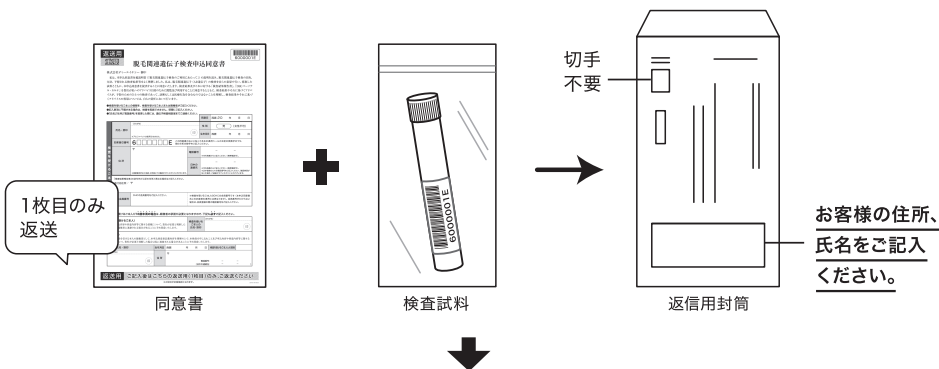

DHCに到着後、検査機関にて遺伝子検査を行います。

受領印が必要な配送方法で検査結果をお届けします。 **注1**

- 日時指定および宅配業者営業所留（郵便局留をのぞく）指定、宅配ボックス指定はできません。
- 試料不足や異物の混入等で検査ができなかった場合は、お手紙などでご連絡いたします。
- 検査後にお届けする「検査結果報告書」等を紛失され、再発行を希望される場合には、「ご本人確認書類」の提出、および「再発行手数料」が別途かかります。 **注2**

注1 「毛髪対策キット」は約3～4週間、


「元気生活応援キット」と「はつらつ人生応援キット」は約4～6週間いただいております。

注2 「毛髪対策キット」は税込¥1,365、「元気生活応援キット」は税込¥2,245、

「はつらつ人生応援キット」は税込¥2,663かかります。


⚠ 採取容器の取り扱い注意事項

採取容器は、だ液試料を安全に採取するためのものです。
そのほかの用途に使用しないでください。

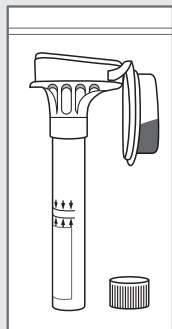

- ✗ 引火の恐れがありますので、採取容器を火に近づけないでください。
- ✗ ふたの中の液体は飲み物ではありません。絶対に飲まないでください。

容器本体とキャップが入っているかを確認してください。

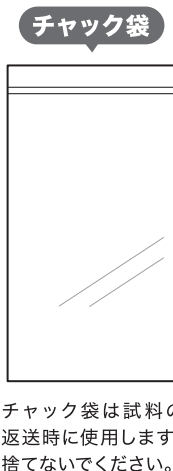

- ・液体が目に入ったり、肌に触れた場合はすぐに水で十分に洗い流し、異常がある場合は医師に相談してください。また衣類に触れると、変色などの恐れがありますのでご注意ください。
- ・お子様やペットの手の届かないところで、使用・保管してください。室温で保管いただけますが、低温になると保存液が凝固する場合があります。常温に戻してからご使用ください。
- ・使用期限は、採取容器のチューブに記載しています。

返送前にチェック！

☐ 同意書の記入漏れはありませんか？

☐ ID番号シールは貼り付けましたか？



万が一、不足しているものや破損しているものがある場合は、ご連絡ください。

遺伝子検査相談室 通話料無料

0120-575-141

9:00~20:00 (土 9:00~17:00) 日・祝日・年末年始休業

お問い合わせの際には、外箱の裏面または「遺伝子検査申込同意書」お客様控に記載の8桁のお客様ID番号が必要となります。大切に保管してください。